

# Gebruiksaanwijzing

## Zelfafnametest


### Genitaal (Mannen)

De zelfafnametest kan eenvoudig worden uitgevoerd. Als u de instructies puntsgewijs volgt zal de test op de juiste manier worden afgenomen.

Neem bij voorkeur ochtendurine af (u mag minimaal 2 uur daarvoor niet hebben geplast). Vang daarna de eerste straal urine op, plas daarna door in de WC.

NB: Stuur na de afname de retourenvelop met inhoud zo snel mogelijk terug.

- 1** Vang de eerste straal urine op in de grotere buis zonder dop.

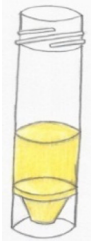


- 2** Gebruik de bijgeleverde pipet om de urine in de buis met gele dop te doen. **(PAS OP: In deze buis zit al vloeistof)**



- 3** Voeg met de pipet urine toe totdat de vloeistofspiegel tussen de 2 zwarte lijnen op de buis zit.



- 4** Maak het buisje weer goed dicht. Draai het buisje 5 x ondersteboven om de inhoud goed te mixen.

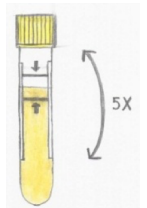

- 5** Gebruik het etiket waarop de afnameplaats “Genitaal” staat.  
Vul hierop je geboortedatum, geslacht en afnamedatum in.  
Plak het etiket in de lengterichting op de buis zodat de barcode van boven naar beneden staat.  
“ALS HET ETIKET NIET OP DE BUIS ZIT OF NIET IS INGEVULD KUNNEN WIJ NIETS MET DEZE BUIS”

- !** Voor aanwijzingen betreffende het versturen van de test,  
zie gebruiksaanwijzing **Versturen Zelfafnametest.**