

Gebruiksaanwijzing

Zelfafnametest

Oraal


De zelfafnametest kan eenvoudig en pijnloos worden uitgevoerd. Als u de instructies puntsgewijs volgt zal de test op de juiste manier worden afgenomen.

N.B. Stuur na de afname het buisje met het borstelgedeelte zo snel mogelijk terug


- 1** Haal het borsteltje uit de verpakking.
Probeer hierbij het borstelgedeelte van het geheel niet aan te raken.
(Neem na opening van de verpakking de test direct af.)




- 2** Neem het borsteltje in de hand

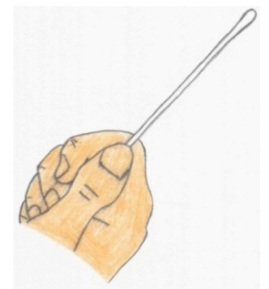


- 3** Neem een gemakkelijke houding aan.
Breng het borsteltje achterin de mondholte.

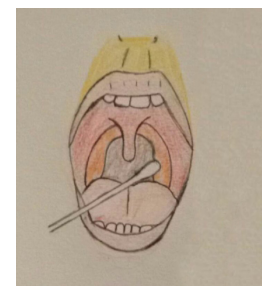


- 4 Draai het borsteltje 5x helemaal rond en haal daarna het borsteltje uit de mond.

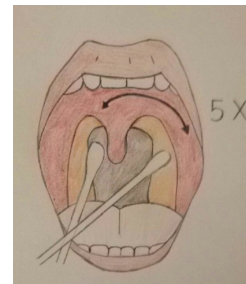

- 5 Maak het buisje met de gele dop open.
(PAS OP: er zit vloeistof in)
Stop het borsteltje in de buis.

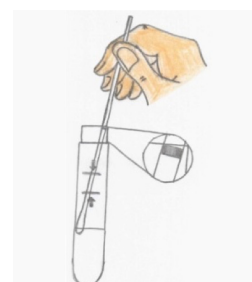

- 6 Breng het stokje ongeveer 4 cm in de buis tegen de wand en breek het stokje af door het uitstekende gedeelte te buigen. Gooi het afgebroken uiteinde weg. Draai de buis goed dicht om te kunnen verzenden.

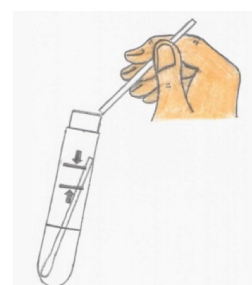

- 7 Gebruik het etiket waarop de afnameplaats "Oraal" staat. Vul hierop je geboortedatum, geslacht en afnamedatum in. Plak het etiket in de lengterichting op de buis zodat de barcode van boven naar beneden staat.
"ALS HET ETIKET NIET OP DE BUIS ZIT OF NIET IS INGEVULD KUNNEN WIJ NIETS MET DEZE BUIS"

- ! Voor aanwijzingen betreffende het versturen van de test, zie gebruiksaanwijzing **Versturen Zelfafnametest**.