


Instructies afname Herpes


Genitalis

De zelfafnametest kan eenvoudig en pijnloos worden uitgevoerd. Als u de instructies puntsgewijs volgt zal de test op de juiste manier worden afgenomen.

- 1** Haal het borsteltje uit de verpakking. Probeer hierbij het borstelgedeelte van het geheel niet aan te raken. (Neem na opening van de verpakking de test direct af.)

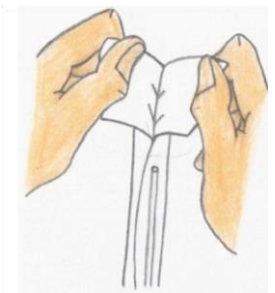

- 2** Neem het borsteltje in de hand.

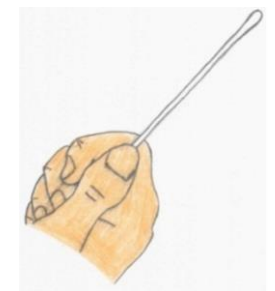

- 3** Neem een gemakkelijke houding aan.




- 4** Haal het borsteltje goed over de aangedane huid heen (minimaal 5x). Indien er intacte blaasjes aanwezig zijn probeer dan het blaarvocht op het borsteltje te krijgen en goed over de blaarbodem te gaan. Dit kan gevoelig zijn! NB. Hier is een vrouwelijke patiënt afgebeeld, maar kan uiteraard ook bij mannen.



- 5** Maak het buisje met de rode dop open. (PAS OP: er zit vloeistof in) Stop het borsteltje in de buis.



- 6** Breng het stokje ongeveer 4 cm in de buis tegen de wand en breek het stokje af door het uitstekende gedeelte te buigen. Gooi het afgebroken uiteinde weg. Draai de buis goed dicht om te kunnen verzenden.

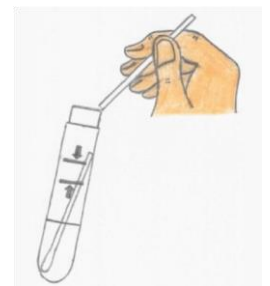

- 7** Gebruik het etiket waarop de afnameplaats “Genitaal” HUID staat. Vul hierop je geboortedatum, geslacht en afnamedatum in. Plak het etiket in de lengterichting op de buis zodat de barcode van boven naar beneden staat.

“ALS HET ETIKET NIET OP DE BUIS ZIT OF NIET IS INGEVULD KUNNEN WIJ NIETS MET DEZE BUIS”

- !** Voor aanwijzingen betreffende het versturen van de test, zie gebruiksaanwijzing **Versturen Zelfafnametest**.